

# GLOBACID<sup>®</sup> AF med

## Pindade kiirdesinfitseerimisvahend

*valmislahus*

### Toote omadused

- kiire toimeaeg (30 sek)
- põhineb alkoholil
- ei sisalda aldehüüde ega kvaternaarseid ammoniumühendeid
- ei jäta pindadele jääkaineid
- eriti sobiv raskesti ligipääsetavatele kohtadele
- mugavas pihustuspudelis

Globacid<sup>®</sup> AF med on meditsiiniseadmete pindade kiireks desinfektsiooniks mõeldud kasutusvalmis desinfektant, mis sobib kasutamiseks kõikidel alkoholi talumatel pindadel. Vahend ei jäta pärast kasutamist pindadele jääkaineid.

### Koostis

Isopropanool 60%, etanool 15%.

### Toimespekter

<b>Bakteritsiidne</b> EN 13727	30 sek
<b>Fungitsiidne</b> EN 13624	30 sek
<b>Tuberkulotsiidne</b> EN 14348 (M. terrae)	30 sek
<b>Virutsiidne</b> prEN 14476:2011 HBV, HIV, HCV, influenza viirused, rotaviirus, vaccinia viirus jt	30 sek
<b>Virutsiidne</b> adenoviirus	60sek

### Kasutamine

Globacid<sup>®</sup> AF med on valmislahus, mida kantakse töödeldavatele pindadele pihustamise teel, vajadusel pühitakse laiali. Pinnad peavad olema täielikult kaetud. Toimeaeg on 30 sekundit isegi mustades tingimustes.

### Kasutusala

Pindade desinfektsiooniks kõikjal, kus on vaja kiiret desinfitseerimist:

- meditsiini- ja hambaravipraksised (inventar nagu näiteks protseduurilauad, kandikud, käepidemed, operatsioonikärud, voodiraamid, sidumismaterjali transpordikastid)
- silmaarsti ja optometri sti tööpinnad
- kiirabiauto inventar

### Hoiatus

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna.

### Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *värvitu vedelik*  
Lõhn: *spetsiifiline alkoholile*  
Lahustuvus: *vees lahustub igas vahekorras*  
Tihedus: *0,84 – 0,86 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

### Utiliseerimine

Kasutamata toote jäägid ja tühjad pakendid anda üle litsentseeritud jäätme käitlejale.

### Vastavus standarditele

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

### Teised testmeetodid

RKI/DVV

### Pakend

500ml pihustuspudel  
5L kanister

