

# SUCTION 1

## Hambaravi imursüsteemide happeline pesemis- ja hooldusvahend

### kontsentraat

### Toote omadused

- väga hea puhastusvõimega
- hooldab torusüsteeme
- bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega
- aitab ära hoida ummistuste teket
- lahustab jääkainete kogumikke

Soovitav on kasutada Suction 1 jääkainetest ja mittelahustuvatest sooladest tingitud problemaatiliste ummistusohlike piirkondade hooldamiseks.

### Koostis

sidrunhape, dimetüüldioktüülammooniumkloriid, orange terpene, metüültiooniumkloriid

### Kasutamine

Kinniste süsteemide happeline läbipesu tehakse 1-2 korda nädalas 2% kontsenraadist ja veest valmistatud töölahusega (lisada 980ml veele 20ml Suction 1 kontsentraati), seejärel valada veel 1 liiter töölahust (või osa algsest lahusest) ka süljekaussi. Toimeaeg: 10 minutit.

Pärast toimeaja möödumist loputada süsteem jaheda veega (vähemalt joogivee kvaliteediga).

**NB!** Ei ole soovitatav hoida lahust süsteemis üle ettenähtud toimeaja.

Soovitav on kord aastas läbi viia aspiratsiooni- ja separatsioonisüsteemide intensiivpesu: Valmistada 2 x 5L töölahus (lisada 4900ml veele 100ml kontsentraati) ja lasta 5L töölahust aspireerida imursüsteemi ning teine 5L valada valamusse, et puhastada separatsioonisüsteem. Enne tööleasumist süsteem loputada jaheda veega (vähemalt joogivee kvaliteediga).

### Hoiatus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Allaneelamisel kahjulik. Väga mürgine veeorganismidele. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski. Vältida sattumist keskkonda.

### Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: värvitu, kergelt opalestseeruv vedelik

Lõhn: iseloomulik

pH: 1.0-2.0 (20°C)

Tihedus: 1,18 g/cm<sup>3</sup>

Lahustuvus: vees lahustub igas vahekorras

### Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-30°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

### Utiliseerimine

Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Pakendi utiliseerimiseks, loputa pakendi sisu veega.

### Vastavus standarditele

EN 1276, EN 1040, EN 1275

### Pakend

1L pudel



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Harjumaa

Telefon 6626 511 | Faks: 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)