

VITASEPT[®] WIPES

Alkoholibaasilised desinfitseerivad rätikud

Toote omadused

- aldehüüdi- ja kloorivaba
- lõhnainete- ja värvainetevaba
- kiire toimeaeg (30 sek)
- sobib nii käte kui alkoholi taluvate pindade desinfitseerimiseks
- ei jäta pindadele jääkaineid
- pehme kangataoline materjal

VITASEPT[®] WIPES on efektiivne laia toimespektriga käte, naha ja alkoholi taluvate pindade desinfektsioonivahend. Pehmed rätikud on immutatud desinfektsioonivahendiga ega jäta pärast kasutamist pindadele jääkaineid, seetõttu sobivad ideaalselt ka nende pindade desinfektsiooniks, mis puutuvad kokku toidu ja toiduainetega.

Koostis

Isopropanool 60%, etanool 15%

Toimespekter

Bakterid: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *MRSA*, *Streptococcus spp.*, *Listeria spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* jt
Viirused: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Influenza viirus ja sh nn seagriipp jt
Seened: *Trichophyton mentagrophytes*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans* jt

Toimeaeg

Käte, naha ja pindade desinfektsioon 30sek

Kasutamine

Rätikud tõmmata välja kuni perforeeritud kohani vastavalt koguse vajadusele ning lahtirebimiseks toetada vajadusel teise käega. Kõik pinnad hoolikalt Vitasept[®] Wipes rätikuga üle pühkida ning veenduda, et puhastatav ala oleks desinfektsiooniainega kaetud. Pärast kasutamist rätik ära visata. Vältimaks rätikute kuivamist, klapp alati sulgeda.

Hoiatus

Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna.

Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *niisutatud puuvillased rätikud*
Värvus: *värvitu*
Lõhn: *spetsiifiline (alkohol)*
pH: *~7*
Tihedus: *0,85g/cm³ (20°C)*

Säilitamine

Vt pakendil olevat kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C ja mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

Vastavus standarditele

EN 13727, EN 14348, EN 13624, prEN 14476

Teised testmeetodid

RKI/DVV

Biotsiidi registreerimistunnistuse nr: 0663/10

Pakend

120 rätikut purgis, rätikute suurus 20 x 20cm
400 rätikut ämbris, rätikute suurus 18 x 20cm