

# VITASEPT® WIPES med

## Alkoholibaasilised desinfitseerimisrätikud

### Toote omadused

- aldehüüdi- ja kloorivaba
- lõhnainete- ja värvainetevaba
- kiire toimeaeg 30 sek
- ei jäta pindadele jääkaineid
- pehme kangataoline materjal

Vitasept® Wipes med on efektiivne laia toimespektriga alkoholi taluvate pindade ja meditsiiniseadmete (nt protseduurilauad, operatsioonikärud, kandikud, hambaravis sirg- ja nurkotsikud jne) desinfektsioonivahend. Pehmed rätikud on immutatud desinfektsioonivahendiga ega jäta pärast kasutamist pindadele jääkaineid.

### Koostis

Isopropanool 60%, etanool 15%.

### Toimespekter

Bakterid: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *MRSA*, *Streptococcus spp.*, *Listeria spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* jt

Viirused: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Influenza viirus jt

Seened: *Aspergillus niger*, *Candida albicans* jt

### Toimeaeg

Pindade desinfektsioon 30sek

### Kasutamine

Rätikud tõmmata välja kuni perforeeritud kohani vastavalt koguse vajadusele ning lahtirebimiseks toetada vajadusel teise käega. Kõik pinnad hoolikalt Vitasept® Wipes med rätikuga üle pühkida ning veenduda, et puhastatav ala oleks täielikult desinfektsioonivahendiga kaetud. Pärast kasutamist rätik ära visata. Vältimaks rätikute kuivamist tuleb klapp alati sulgeda.

### Hoiatus

Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna.

### Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *niisutatud puuvillased rätikud*

Värvus: *värvitu*

Lõhn: *spetsiifiline (alkohol)*

pH: *~7*

Tihedus: *0,85g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C ja mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

### Utiliseerimine

Kasutamata toote jäägid ja tühjad pakendid anda üle litsentseeritud jäätme käitlejale.

### Vastavus standarditele

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

### Teised testmeetodid

RKI/DVV

### Pakend

120 tk purgis, rätikute suurus 20 x 20cm

400 tk ämbris, rätikute suurus 18 x 20cm

