

CYCLONE RTU med

Puhdistava desinfiointiaine

valmis liuos

Tuotteen ominaisuudet

- hyvät puhdistusominaisuudet
- poistaa virtsasta johtuvan epämiellyttävän hajun
- helppokäyttöisessä suihkepullossa
- nopea vaikutusaika (1 minuutti)

Cyclone RTU med on tehokas aine lääkinnällisten laitteiden (alusastiat, wc-tuolit jne.) puhdistamiseen, desinfiointiin ja epämiellyttävän hajun poistamiseen. Lisäksi tuote täyttää elintarviketeollisuuden, kauneudenhoitoalan ja muiden alojen viranomaisvaatimukset.

Koostumus

vesi, kvaternääriset ammoniumyhdisteet, HEDP, ortofosforihappo.

Vaikutusspektri

Tuotteessa käytetty synergisten vaikuttavien aineiden ansiosta tuotteella on laaja vaikutusspektri. Tuhoaa Grampositiiviset ja -negatiiviset bakteerit, on erittäin tehokas hiivasienien suhteen.

Käyttö

Käyttöliuoksella käsitellään vesipesua kestäviä työvälineitä ja muita laitteita, jotka tarvitsevat desinfiointia ja epämiellyttävän hajun poistamista.

Suihkuta liuosta pintoihin ja anna sen vaikuttaa 1 minuutin. Huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä.

Poistaa tehokkaasti jopa virtsasta johtuvan epämiellyttävän hajun.

Varoitus

Ärsyttää ihoa ja silmiä.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *läpinäkyvä, väritön neste*

Haju: *tyypillinen*

pH: *~2*

Liukenevuus: *liukenee vedessä kaikissa suhteissa*

Tiheys: *1,030 g/cm³*

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

Kierrätys

Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemäriessä biohajoavia. Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä.

Vastaavuus standardeihin

EN 13727, EN 13624, EN 1275



Lisäksi tuote täyttää elintarviketeollisuuden, kauneudenhoitoalan ja muiden alojen viranomaisvaatimukset.

Pakkaus

500 ml suihkepullo
5L kanisteri



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 6626 511 | Faksi: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com