

CYCLONE RTU med

Дезинфицирующее средство с чистящими свойствами

готовый раствор

Свойства продукта

- имеет интенсивные чистящие свойства
- удаляет неприятный запах мочи
- в удобной бутылке с распылителем
- быстродействующее (1 минута)

Cyclone RTU med это эффективное средство для чистки медицинского оборудования (больничные утки, стульчаки и т.д.), их дезинфекции и устранения неприятного запаха.

Состав

вода, четвертичные аммониевые соединения, HEDP, ортофосфорная кислота.

Спектр действия

В средстве использованы активные вещества синергического действия, которые обеспечивают широкий спектр действия. Уничтожает грамположительные и -отрицательные бактерии, очень эффективен в отношении дрожжевых грибов.

Использование

Готовым раствором обрабатываются устойчивые к влажной чистке орудия труда и прочий инвентарь, который нуждается в дезинфекции и устранении неприятного запаха.

Распылить непосредственно на очищаемую поверхность, дать воздействовать в течение 1 минуты и прополоскать чистой водой.

Эффективно удаляет даже неприятный запах мочи!

Предупреждение

Вызывает раздражение кожи и глаз.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *прозрачная, бесцветная жидкость*

Запах: *характерный*

pH: *~2*

Растворимость: *в воде растворяется в любом соотношении*

Плотность: *1,030 г/см³*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, не храните его на открытом солнце и избегайте его замерзания.

Утилизация

Остатки неиспользованного продукта и пустую упаковку передать лицензированному предприятию по обращению с отходами.

Соответствие стандартам

EN 13727, EN 13624, EN 1275

Также соответствует требованиям пищевой промышленности, косметологии и т.д.

Упаковка

500 мл бутылка с распылителем
5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Урда теэ 3, Ялгимяэ, волость Саку, Эстония
Телефон +372 6626 511 | Факс: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com