

GLOBACID® AF

Средство для быстрой дезинфекции поверхностей

готовый раствор

Свойства продукта

- быстросействующее (30 сек.)
- на базе алкоголя
- не содержит альдегидов и четвертичных соединений аммония
- не оставляет осадка
- особенно подходит для труднодоступных мест
- в удобной бутылке с распылителем

Globacid® AF это готовое к использованию дезинфицирующее средство для быстрой дезинфекции поверхностей, которое подходит для использования на всех поверхностях, устойчивых к алкоголю. После использования средство не оставляет осадка на поверхности, и поэтому идеально подходит для обработки поверхностей, соприкасающихся с пищей и продуктами питания.

Состав

изопропанол 60%, этанол (денат.) 15%

Спектр действия

Бактерицидное воздействие EN 13727	30 сек.
Фунгицидное воздействие EN 13624	30 сек.
Туберкулицидное воздействие EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 сек.
Вирулицидное воздействие EN 14476 Вирусы ВГВ, ВИЧ, гепатит С, инфлуэнца, ротавирус, вирус коровьей оспы и проч.	30 сек.
Вирулицидное воздействие аденовирус	60 сек.

Использование

Распылить или нанести тряпкой на поверхность и оставить для воздействия. Поверхность должна быть покрыта полностью. Время действия - 30 секунд даже в условиях загрязнения.

Предупреждение

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *ясная, бесцветная жидкость*

Запах: *специфический, присущий алкоголю*

Растворимость: *в воде растворяется в любом соотношении*

Плотность: *0,84 – 0,87 г/см³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

Соответствие стандартам

EN 13624, EN 13727,
EN 14348, EN 14476

Другие тестовые методы

RKI/DVV

Упаковка

500мл бутылка с распылителем
5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Урда теэ 3, Ялгимяэ, волость Саку, Эстония
Телефон +372 6626 511 | Факс: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com