

# GLOBADENT<sup>®</sup> RTU

## Aldehydion hammasjäljennösten ja proteesien desinfiointiaine

valmis liuos

### Tuotteen ominaisuudet

- amiinipohjainen valmis liuos
- hammasjäljennösten, -proteesien ja jäljennöslusikoiden pesuun ja desinfiointiin
- käytetään silikonista, alginaatista, polyeetterikumista, polysulfidista ja hydrokolloidista valmistettujen jäljennösten, proteesituotteiden tms. puhdistukseen ja desinfiointiin
- nopea vaikutusaika (5 min)
- kipsimallien tarkkuus erinomaisten puhdistusominaisuuksien vuoksi (veri, sylki tms.)
- laajavaikutteinen (Tbc, HIV, HBV ym)

### Koostumus

Amiinit, kvaternääriset ammoniumyhdisteet, polyglykolieetterit, guanidiini, korroosionestoaine

### Vaikutusspektri

Tuotteella on bakterisidinen (mm. tuberkulosidinen), virusidinen (mm. HBV, HCV, HIV) ja fungisidinen vaikutus.

### Käyttö

Hammasjäljennöksen ottamisen tai hammasproteesien sovituksen jälkeen aseta ne kannella suljettavaan käyttöliuoksella täytettyyn astiaan 5 minuutiksi. Tarkista, että kaikki desinfiointavat pinnat ovat liuoksen peitossa. Vaikutusajan päätyttyä pese jäljennökset/proteesit (vähintään juomaveden laatuksella vedellä). Liuosta voi käyttää enintään 7 työpäivänä työn intensiteetin mukaan.

**Huom.!** Hammasjäljennöksiä, proteeseja tms. ei ole suositeltavaa pitää liuoksessa yli määrätyn vaikutusajan.

**Huom.!** Vältä kosketusta glutaarialdehydin kanssa!

### Varoitus

Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ /silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

### Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: väritön neste  
 Haju: luonteenomainen amiinille  
 pH: 9-10 (20°C)  
 Liukenevuus: liukenee vedessä kaikissa suhteissa  
 Tiheys: 1,01 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

### Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä 5–30°C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä, korkki tiiviisti suljettuna.

### Kierrätys

Toimita tuotteen jäännökset ja tyhjät pakkaukset jätehuoltoyritykselle, jolla on asianmukainen toimilupa.

### Vastaavuus standardeihin

EN 1276, EN 13727, EN 14562, EN 14348, EN 14476+A1, RKI/DVV, DGHM

### Pakkaus

5L kanisteri



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 662 6511 | Faksi +372 662 6522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)