

GLOBADENT® RTU

Aldehīdu nesaturošs līdzeklis zobu atlējumu un protēžu dezinficēšanai

lietošanai gatavs šķīdums

Produkta īpašības

- lietošanai gatavs šķīdums uz amīnu bāzes
- zobu nospiedumu, protēžu, tiltu, kroņu un nospiedumu karošu mazgāšanai un dezinficēšanai
- izmanto silikona, algināta, poliētera gumijas, polisulfīda un hidrokoloida nospiedumu, protezēšanas darbu u.tml. tīrīšanai un dezinficēšanai
- ātra iedarbība (5 min)
- ģipša modeļu precizitāte ļoti labu tīrīšanas īpašību dēļ (asinis, siekalas u.tml.)
- ar plašu iedarbības spektru (Tbc, HIV, HBC utt.)

Sastāvs

Amīni, četraizvietotie amonija savienojumi, poliglikolēteris, guanidīna, korozijas inhibitorus

Iedarbības spektrs

Līdzeklim ir baktericīda (t. sk. tuberkolocīdu), vīrusus inaktivējoša (t. sk. HBV, HCV, HIV) un fungicīda iedarbība.

Kasutamine

Pēc zobu nospiedumu noņemšanas vai zobu protēžu izmēģināšanas tās uz 5 minūtēm ievietot traukā, kas piepildīts ar lietošanai gatavo šķīdumu. Sekot, lai visas dezinficējamās virsmas būtu nosegtas ar šķīdumu. Kad iedarbības laiks pagājis, nospiedumus un protēzes noskalot (ar vismaz dzeramā ūdens kvalitāti). Šķīdumu var izmantot līdz 7 darbdienu, atkarībā no darba slodzes.

NB! Zobu nospiedumus, protēzes u.c. nav ieteicams turēt šķīdumā ilgāk par paredzēto iedarbības laiku.

NB! Izvairīties no saskares ar glutāraldehīdu!

Brīdinājums

Kaitīgs, ja norij. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vide. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *bezkrāsains šķidrums*

Smarža: *raksturīgs amīnam*

pH: *9-10 (20°C)*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Tihedus: *1,01 g/cm³ (20°C)*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-30°C temperatūrā korķis blīvi noslēgts, neglabāt tiešos saules staros.

Utilizācija

Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu apsaimniekotājam.

Atbilstība standartiem

EN 1276, EN 13727, EN 14562, EN 14348, EN 14476+A1, RKI/DVV, DGHM

Iepakojums

5L skārda kārba



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jālgimāe, Saku pagasts, Igaunija
Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com