

# GLOBAQUAT® RTU

## Alkoholiton ja materiaaliystävällinen puhdistus- ja desinfiointiaine

valmis liuos

### Tuotteen ominaisuudet

- alkoholiton, ei sisällä aldehydejä
- ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- nopea vaikutusaika (1 minuutti)
- laaja materiaalien yhteensopivuus
- erittäin hyvä puhdistuskyky
- helppo käyttää

Kolmen eri kvaternäärisen ammoniumyhdisteen ja pinta-aktiivisen aineen ainutlaatuinen yhdistelmä antaa tuotteelle erinomaiset puhdistus- ja desinfiointiominaisuudet.

### Koostumus

kolme erilaista kvaternääristä ammoniumyhdistettä 0,75 %

### Käyttö

Käytetään akryylipintojen, erilaisten muovien, kuntosalilaitteiden, johtojen, leikkikalujen, patjojen ym. puhdistamiseen ja desinfiointiin. Levitetään pinnalle suihkuttamalla tai liinalla. Annetaan vaikuttaa 1 minuutti ja pyyhitään sen jälkeen puhtaalla liinalla tai kertakäyttöpyyhkellä.

### Vaikutusspektri

Pintojen desinfiointi (pyyhittäessä)

Bakterisidinen (EN 1276, DGHM)	1 min
Virusidinen (HBV, HIV, HCV)	1 min
Rota, Vaccinia	1 min
Noro-virus	30 min
Fungisidinen (EN 1275)	1 min

### Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *kevyesti opalisoiva, väritön, kirkas neste*

Haju: *tyypillinen*

pH: *7,0-7,5 (25°C)*

Liukenevuus: *liukenee vedessä kaikissa suhteissa*

Tiheys: *0,98 – 1,01 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

### Vastaavuus standardeihin

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562

### Muut testausmenetelmät

DGHM, DVG, DVV/RKI,

„Vaikutus akryylilasille“ Röhm GmbH

### Pakkaus

500ml suihkepullo

5L kanisteri



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 6626 511 | Faksi: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)