

# GLOBAQUAT® RTU med

**Безалкогольное, безопасное для материала чистящее и дезинфицирующее средство**

*готовый раствор*

## Свойства продукта

- безалкогольное и безальдегидное
- без запаха и красителя
- быстродействующее (1 минута)
- подходит для широкого спектра материалов
- очень хорошие чистящие свойства
- удобно в использовании

Уникальное сочетание трех различных четвертичных аммониевых соединений и поверхностно-активных веществ придает продукту превосходные очищающие и дезинфицирующие свойства.

## Состав

три различных четвертичных аммониевых соединения 0,75%

## Использование

Используется для очистки и дезинфекции медицинского оборудования, ультразвуковых датчиков, стоматологических кресел для пациентов, акриловых поверхностей, разного рода пластика, проводов, матрасов и т.п. Нанести на поверхность разбрызгивателем или при помощи тряпки, дать воздействовать в течение 1 минуты, после чего вытереть чистой тряпкой или одноразовыми салфетками.

## Спектр действия

Дезинфекция поверхностей (протираение)

Бактерицидное воздействие (EN 1276, DGHM)	1 мин.
Вирулицидное воздействие (ВГВ, ВИЧ, НВС)	1 мин.
Ротавирус, вирус коровьей оспы	1 мин.
Норовирус	30 мин.

## Физические и химические свойства

Физическое состояние: *жидкость, слегка опалесцирующая*

Цвет: *бесцветная*

Запах: *специфический*

pH: *7,0-7,5 (25°C)*

Растворимость в воде: *полная, в любом соотношении*

Плотность: *0,98 – 1,01 г/см<sup>3</sup> (20°C)*

## Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при комнатной температуре, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

## Утилизация

Остатки неиспользованного продукта и пустую упаковку передать лицензированному предприятию по обращению с отходами.

## Соответствие стандартам

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275

## Другие тестовые методы

DGHM, DVG, DVV/RKI

Röhm GmbH «Воздействие на акриловое стекло»

## Упаковка

500 мл бутылка с распылителем  
5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Урда теэ 3, Ялгимяэ, волость Саку, Эстония  
Телефон +372 6626 511 | Факс: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)