

GLOBALQUAT® WIPES

Дезинфицирующие безалкогольные очищающие салфетки, безопасные для материала

Свойства продукта

- без запаха и красителя
- быстродействующее (1 минута)
- подходит для широкого спектра материалов
- безалкогольное и безальдегидное
- очень хорошие чистящие свойства
- удобно в использовании

Состав

три различных четвертичных аммониевых соединения 0,75%

Спектр действия

Салфетки Globaquat® Wipes обладают бактерицидным, вирулицидным (ВГВ, гепатит С, ВИЧ, Рота, вирус коровьей оспы, инфлюэнца и т.п.) и фунгицидным действием.

Время воздействия

1 минута, также в условиях загрязнения.

Использование

Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, придерживая другой рукой. Все поверхности тщательно протереть салфеткой Globaquat® Wipes и убедиться, что очищаемый участок покрыт дезинфицирующим веществом. После использования салфетку следует выбросить. Чтобы салфетки не высыхали, следует плотно закрывать крышку. В случае высыхания салфеток произвести их увлажнение при помощи средства Globaquat® RTU.

Не подходят для очищения рук.

Сфера применения

Используются для очистки и дезинфекции акриловых поверхностей, разного рода пластика,

инвентаря фитнес-клубов, мониторов, проводов, игрушек, матрасов и т.п.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *влажные белые салфетки, пропитанные прозрачной, слегка опалесцирующей жидкостью*

Запах: *специфический*

рН: *7,0-7,2*

Плотность (жидкость): *0,98 – 1,01 г/см³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке.

Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при комнатной температуре, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

Соответствие стандартам

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562

Другие тестовые методы

DGHM, DVG, DVV/RKI, «Воздействие на акриловое стекло» Röhm GmbH

Упаковка

120 шт. в банке, размеры салфеток 20 x 20 см
450 шт. в ведре, размеры салфеток 18 x 20 см



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Урда теэ 3, Ялгимяэ, волость Саку, Эстония
Телефон +372 6626 511 | Факс: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com