

GLOBAQUAT® WIPES med

Desinfiovat materiaaliystävälliset alkoholittomat puhdistuspyyhkeet

Tuotteen ominaisuudet

- ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- nopea vaikutusaika (1 minuutti)
- laaja materiaalien yhteensopivuus
- alkoholiton, ei sisällä aldehydejä
- erittäin hyvä puhdistuskyky
- helppo käyttää

Koostumus

kolme erilaista kvaternääristä ammoniumyhdistettä muodostaa 0,75%

Vaikutusspektri

Globaquat® Wipes-liinoilla on bakterisidinen, virusidinen (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Influenssa jne.) ja fungisidinen vaikutus.

Vaikutusaika

1 minuutti myös likaisissa olosuhteissa.

Käyttö

Pyyhettä vedetään rei'itettyyn kohtaan asti määrän tarpeen mukaan. Irti revittäessä tuetaan tarvittaessa toisella kädellä. Pyyhitään kaikki pinnat huolellisesti Globaquat® Wipes-liinalla ja tarkistetaan, että puhdistettava alue olisi desinfiointiaineella käsitelty. Heitä liina pois käytön jälkeen. Lämpö on suljettava liinon kuivumisen välttämiseksi.

Käyttöalue

Käytetään lääkinnällisten laitteiden (EKG, ultraääniantureiden, keskoskaappien), hammashoidon potilastuolien, akrylipintojen, erilaisten muovien, johtojen, patjojen ym. puhdistamiseen ja desinfiointiin.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *kosteat puuvillaliinat, jotka on imeytetty läpinäkyvällä, kevyesti opalisoivalla ja vähäviskoosisella nesteellä*

Haju:

tyypillinen

pH:

7,0-7,2

Tiheys:

0,98 – 1,01 g/cm³ (20°C)

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

Kierrätys

Toimita tuotteen jäännökset ja tyhjät pakkaukset jätehuoltoyritykselle, jolla on asianmukainen toimilupa.

Vastaavuus standardeihin

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275

Muut testausmenetelmät

DGHM, DVG, DVV/RKI

„Vaikutus akryylilasilille“ Röhm GmbH

Pakkaus

120 kpl purkissa (pyyhkeen mitat 20x20cm)

450 kpl sangossa (pyyhkeen mitat 18x20cm)



0537



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 6626 511 | Faksi: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com