

# GLOBAQUAT<sup>®</sup> WIPES med

**Дезинфицирующие безалкогольные очищающие салфетки, безопасные для материала**

## Свойства продукта

- без запаха и красителя
- быстродействующее (1 минута)
- подходит для широкого спектра материалов
- безалкогольное и безальдегидное
- очень хорошие чистящие свойства
- удобно в использовании

## Состав

три различных четвертичных аммониевых соединения 0,75%

## Спектр действия

Салфетки Globaquat<sup>®</sup> Wipes обладают бактерицидным, вирулицидным (ВГВ, ВГС, ВИЧ, Рота, вирус коровьей оспы, инфлюэнца и т.п.) и фунгицидным действием.

## Время воздействия

1 минута, также в условиях загрязнения.

## Использование

Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, придерживая другой рукой. Все поверхности тщательно протереть салфеткой Globaquat<sup>®</sup> Wipes med и убедиться, что очищаемый участок покрыт дезинфицирующим веществом. После использования салфетку следует выбросить. Чтобы салфетки не высыхали, следует плотно закрывать крышку.

## Сфера применения

Используются для очистки и дезинфекции медицинского оборудования (ЭКГ, ультразвуковые датчики, кувезы), стоматологических кресел для пациентов,

акриловых поверхностей, разного рода пластика, проводов, матрасов и т.п.

## Физические и химические свойства

Физическое состояние: *влажные*

*хлопчатобумажные*

*салфетки,*

*пропитанные*

*прозрачной, слегка*

*опалесцирующей и*

*обладающей малой*

*вязкостью жидкостью*

*специфический*

Запах:

рН:

Плотность:

*7,0-7,2*

*0,98 – 1,01 г/см<sup>3</sup> (20°C)*

## Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке.

Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при комнатной температуре, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

## Утилизация

Остатки неиспользованного продукта и пустую упаковку передать лицензированному предприятию по обращению с отходами.

## Соответствие стандартам

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275

## Другие тестовые методы

DGHM, DVG, DVV/RKI

## «Воздействие на акриловое стекло»

Röhm GmbH

## Упаковка

120 шт. в банке, размеры салфеток 20 x 20 см

450 шт. в ведре, размеры салфеток 18 x 20 см

