

# VITASEPT<sup>®</sup> WIPES med

## Mitrās dezinfekcijas lupatiņas uz alkohola bāzes

### Produkta īpašības

- nesatur aldehīdus un hloru
- nesatur parfīmus un krāsvielas
- ātra iedarbība (30 sekundes)
- uz virsmām neatstāj atliekvielas
- mīksts, audumam līdzīgs materiāls

Vitasept<sup>®</sup> Wipes med ir efektīvs plašas iedarbības spektra dezinfekcijas līdzeklis alkohola izturīgām virsmām un medicīnas iekārtām (piem., procedūru galdiem, operāciju ratiņiem, paplātēm, taisnajiem un leņķa uzgaļiem zobārstniecībā).

Mīkstās lupatiņas ir piesūcinātas ar dezinfekcijas līdzekli un pēc izmantošanas uz virsmām neatstāj atliekvielas.

### Sastāvs

Izopropanols 60%, etanols 15%

### Iedarbības spektrs

Baktērijas: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.* (MRSA), *Streptococcus spp.*, *Listeria spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* u. c.

Vīrusi: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Influenza vīruss u. c.

Sēnītes: *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans* u. c.

### Iedarbības laiks

Virsmu dezinfekcija 30 sekundes

### Lietošana

Izvelciet lupatiņu līdz perforētajai atzīmei atbilstoši vajadzīgajam daudzumam un, ja nepieciešams, pieturiet ar roku, lai to noplēstu. Rūpīgi pārslaukiet ar Vitasept<sup>®</sup> Wipes med lupatiņu visas virsmas un pārliecinieties, lai apstrādājamā virsma pilnībā būtu klāta ar dezinficējošo līdzekli. Pēc izmantošanas

lupatiņu izmetiet. Lai nepieļautu lupatiņu izkalšanu, vienmēr aizveriet vāciņu.

### Brīdinājums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *piesūcinātas kokvilnas lupatiņas*

Krāsa: *bezkrāsaina*

Smarža: *specifiska (raksturīga alkoholam)*

pH: *~7*

Blīvums: *0,85 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules staros.

### Utilizācija

Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu apsaimniekotājam.

### Atbilstība standartiem

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

### Citas testa metodes

RKI/DVV

### Iepakojums

120 salvetes burkā (salvešu izmērs 20x20cm)

450 salvetes spainī (salvešu izmērs 18x20cm)



0537